

Total Care BV – 12V stekker type B: Löwenstein Prisma- apparatuur



Gebruikershandleiding

Handleiding voor 12V stekker – Löwenstein Prisma Smart Max apparatuur

Dit afgeschermd gelijkstroomsnoer is ontworpen voor het voeden van het Löwenstein Prisma Smart Max PAP-apparaat, wanneer netspanning niet beschikbaar is. Het snoer kan middels een sigarettenplug worden aangesloten op een 12-volt gelijkspanningsuitgang, zoals die in voertuigen wordt aangetroffen, of op een externe accu. Het snoer is uitgerust met een geïntegreerde glaszekering om de veiligheid te waarborgen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het snoer gebruikt.

Technische specificaties:

Ingangsspanning	10.5 – 32V $\pm$ 0.5V
Uitgangsspanning	Afhankelijk van apparaat
Maximaal vermogen	72W
Temperatuurgebruik	20°C tot +35°C
Opslag temperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen (LxBxH)	111 x 48 x 35 mm
Gewicht	260 gram

Inhoud van het pakket:

- Afgeschermd gelijkstroomsnoer met voorgeïnstalleerde 8A glaszekering
- Twee vervangende zekeringen (8 ampère)
- Gebruiksaanwijzing

Instructies voor gebruik

Aansluiten op een auto-, camper-, of bootaccu

1. Schakel de motor van het voertuig uit.
2. Verbind de barrel plug van het snoer met de gelijkstroomaansluiting van het behandelingsapparaat.
3. Plaats de autostekker in de 12V aansluiting van het voertuig en sluit de kabel aan op het PAP-apparaat.
4. Schakel het PAP-apparaat in en controleer of het correct functioneert.


Voorzorgsmaatregelen

- **Compatibiliteit:** Het snoer is specifiek ontworpen voor gebruik met 12-volts 'negatief geaarde' elektrische systemen. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig of neem contact op met de fabrikant als u niet zeker bent van het type elektrisch systeem in uw voertuig. Gebruik met een 12-volts 'positief geaard' systeem kan leiden tot beschadiging van zowel het apparaat als het voertuig.
- **Gebruik niet tijdens motorwerking:** Gebruik het apparaat niet terwijl de motor van het voertuig draait, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- **Laat het snoer niet aangesloten:** Wanneer het apparaat niet in gebruik is, laat het snoer dan niet in de aansluiting van het voertuig zitten om ongewenst stroomverbruik te voorkomen.
- **Regelmatige inspectie:** Controleer het snoer en de kabels regelmatig op slijtage of beschadigingen. Vervang beschadigde onderdelen direct.
- **Bescherm het snoer tegen vocht.**
- **Zorg ervoor dat de omvormer niet bedekt is tijdens het gebruik** om oververhitting van de omvormer te voorkomen.

Zekering vervangen

Het snoer is uitgerust met een geïntegreerde glaszekering van 8 ampère. Als de zekering doorbrandt, volg dan de onderstaande stappen om deze veilig te vervangen:

1. Schroef de dop van de autostekker los en verwijder deze samen met de oude zekering.
2. Plaats een nieuwe 8-ampère zekering.
3. Schroef de dop stevig vast.

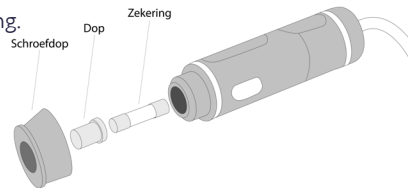

Onderhoud en veiligheid

- Gebruik uitsluitend originele zekeringen van 8 ampère.
- Raadpleeg de handleiding van uw therapieapparaat voor verdere veiligheidsinstructies en EMC-informatie.

Garantie-informatie

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar, geldig vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt fabricagefouten, materiaaldefecten en technische storingen onder normaal gebruik. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product correct is gebruikt volgens de instructies in deze handleiding en is niet overdraagbaar.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste installatie of gebruik tijdens het draaien van de motor.
- Normale slijtage van het product, zoals kabelslijtage.
- Schade door externe factoren, zoals water, brand of onjuiste spanning.
- Defecten veroorzaakt door modificaties of aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door een partij vanuit Total Care B.V.
- Verlies of schade als gevolg van foutief gebruik in een voertuig met een 12-volts 'positief geaard' systeem.

Opmerking

Dit snoer is een optioneel accessoire, ontwikkeld door Total Care in samenwerking met MSP Medical Spare Parts, en werkt alleen in combinatie met de Löwenstein Prisma Smart Max. Zorg ervoor dat u de juiste aansluiting en spanning gebruikt zoals vermeld in de specificaties om schade aan het apparaat of het voertuig te voorkomen.



MSP Medical Spare Parts

Total Care BV
Poppelseweg 7c,
5051 PL, Goirle

info@totalcaregroep.nl
31 (13) - 531 35 35



MSP-PS-LS-00100
Power Cable 12V/DC for Löwenstein
P/N: 648065
Replacement Part

