

## DeVilbiss Sleepcube uitlees-handleiding

Voor het maken van een rapportage op de site van DeVilbiss SleepCube zijn de volgende stappen noodzakelijk.

### Eerst noteren we de codes van het apparaat.

Start de machine door op On/Off (1) te drukken.

Druk op pijl links (3) om de SmartCodes in het beeldvenster te krijgen.

De eerste code, laatste dag, verschijnt, noteer de code.

Druk op de pijl naar beneden (6) om de volgende SmartCode in beeld te krijgen, laatste 7-dagen.

Druk vervolgens weer op de pijl naar beneden (6) om de volgende SmartCode, laatste 30-dagen, in het venster te laten verschijnen. Noteer ook deze code.


Opnieuw op de pijl naar beneden (6) drukken en de SmartCode, laatste 90-dagen, verschijnt in beeld. Noteer ook deze code.

Ten slotte drukken we opnieuw op de pijl naar beneden (6) en de Gebruikerscode verschijnt. Opnieuw noteren we de code.

Door een aantal malen op Pijl links (3) te drukken, krijgen we uiteindelijk het serienummer in beeld. Deze code noteren we ook. Dit nummer bestaat uit een letter- en cijfercombinatie, bijvoorbeeld HS005314.

Als we deze codes hebben genoteerd, kan de machine met de knop On/Off (1) uit gezet worden.

Start de computer op en ga naar [www.sleepcube.com](http://www.sleepcube.com).

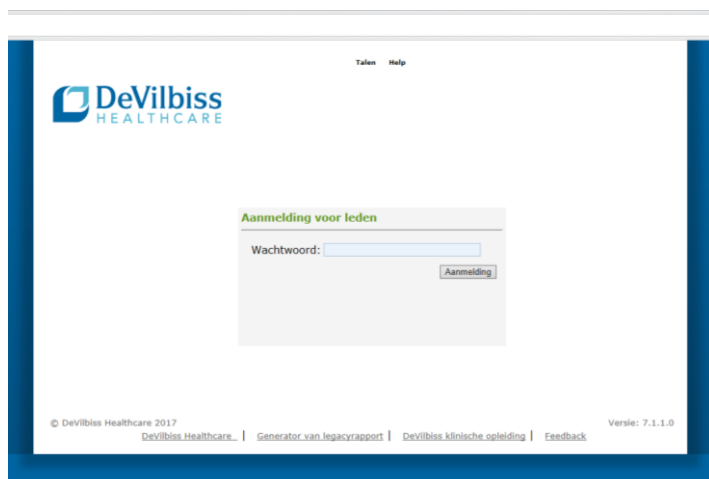

Er wordt ons gevraagd om een wachtwoord in te voeren: **devilbisshc** Type dit wachtwoord zonder hoofdletters of spaties. Kies aanmelden en het volgende scherm opent zich:

Instructies voor het genereren van een SmartCode-rapport:

## 1 Apparaatgegevens

Heeft u een DV6 DeVilbiss BLUE® of DV5 SleepCube®:

DV6-series

DV5-series



Wat is uw model?

DV51 Standard CPAP  
DV53 Standard Plus  
DV54 AutoAdjust CPAP  
DV55/56 Bilevel  
DV57 AutoBilevel

Vraag de SmartCode-tekenreeks van DeVilbiss vanaf het CPAP-apparaat op. ?

Voer code(s) hieronder in	Code-id	Foutcontrole	S/N
Laatste dag: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd
Laatste 7 dagen: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd
Laatste 30 dagen: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd
Laatste 90 dagen: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd
SmartCode - Gebr: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd	<input type="radio"/> Niet gecontroleerd

Serienummer gevalideerd?:

Volgende stap

OPMERKING: de gegevens van de patiënt, het apparaat, de provider en arts zijn optioneel en moeten alleen worden ingevuld als deze gegevens in het rapport dienen te staan.

Kies het juiste type apparaat door DV5-series te selecteren en vervolgens DV54 AutoAdjust CPAP aan te klikken.

Vul de verschillende codes in op de juiste plaats: laatste dag, laatste 7 dagen, enz. Vergeet niet de SmartCode Gebr. In te vullen.

Verder vullen we indien gewenst de Patiëntgegevens, de Apparaatgegevens, enz. in. Kies in ieder geval wel het selectievakje Serienummer gevalideerd en vul het serienummer in.

Als alle gegevens zijn ingevuld, in ieder geval de SmartCodes en het serienummer, dan kies je voor Rapport Genereren.

Een nieuw scherm met het Rapport opent zich:

Men kan nu door het hele rapport bladeren. Om het rapport op te slaan zijn de volgende stappen noodzakelijk:

Kies PDF ophalen. Na enige ogenblikken opent zich de Acrobat PDF-Reader zich met het rapport. Mocht je niet in het bezit zijn van deze reader, hij is gratis te downloaden van [www.adobe.com](http://www.adobe.com)

U kunt vervolgens het rapport opslaan op uw computer.

Vorige PDF ophalen Help

**DeVilbiss HEALTHCARE**

Patiëntgegevens	Gegevens patiëntapparaat
<p>Naam: Adres 1: Adres 2: Plaats, Staat, Postcode: Tel: Geboortedatum: Betaaler: ID: Patiëntdossiernr:</p>	<p>Serienummer: Voorgeschreven drukinstellingen: Bevochtiging: Interface: Type apparaat: Datum naar behandelingen pãbörjades: Datumkoden insamlades: Aantal kalenderdagen in rapportageperiode: Titratiemodus: CPAP Drempel voor minimumgebruik: 4 uur</p>
<p>Leveranciersgegevens</p> <p>Bedrijfsnaam: Adres 1: Adres 2: Plaats, Staat, Postcode: Contactpersoon:</p>	<p>Gegevens verwijzend arts</p> <p>Naam: Groep/praktijk: Adres 1: Adres 2: Plaats, Staat, Postcode: Tel: Fax: E-mail:</p>
<p>Gebruiksgeg.</p>	